



- |    |           |
|----|-----------|
| 3  | deutsch   |
| 4  | français  |
| 5  | italiano  |
| 6  | english   |
| 7  | español   |
| 8  | dutch     |
| 9  | magyar    |
| 10 | русский   |
| 11 | português |
| 12 | polski    |
| 13 | svenska   |
| 14 | dansk     |
| 15 | suomi     |
| 16 | slovensky |
| 17 | české     |

## OMNIMED® Protect

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Medizinprodukt der Marke OMNIMED® entschieden. Wir bitten Sie, die beiliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen. Sollten trotzdem Fragen zur Anwendung des Produktes auftreten, wenden Sie sich bitte an den behandelnden Arzt oder an Ihr Fachgeschäft.

### Indikationen

- Instabilitätsgefühl
- Gelenkgüsse und Schwellungen bei Verschleisserscheinungen (Arthrose/Arthritis)
- posttraumatische bzw. postoperative Reizzustände
- Muskelsehnenkrankung

### Kontraindikationen

Bei Hauterkrankungen, offenen Wunden, Durchblutungs- oder Empfindungsstörungen sollte die Bandage nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt getragen werden.

### Pflege

Wir empfehlen, die OMNIMED® Protect von Hand bei 30 °C mit einem Feinwaschmittel zu waschen. Bandage nicht schleudern, wringen oder chemisch reinigen. Zum Trocknen Bandagen nicht direkter Hitze (Heizkörper, Tumbler) aussetzen.

### ⚠ Achtung

Fette, Öle, Lotionen und Salben können das Material schädigen.



30 °C / 86 °F

### Lagerung

Bei Raumtemperatur und trocken lagern.